


エレクトメーター (erection meter)

夜間陰莖勃起計測器

夜間寝ている間に、計測が完了します。



就寝前にゲージの右端にあるストッパーにベルトを通し、輪にして陰莖の根元近くに強く締め付けずに外れない程度に巻きつけて、ストッパーの位置の値を記録し、翌朝ストッパーの位置の値を再度記録し勃起の判定をします。

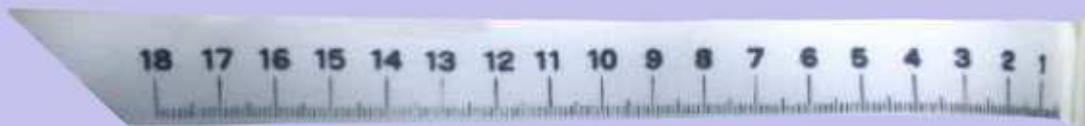

オーキドメーター

RA-125PLUS

assi社

14種(1~35ml)セット



【測定方法】

正確な測定が行われるよう仰臥位で行います。

精巣は親指と人差し指の間で持ち上げ、皮膚は軽く伸びる程度にし、陰囊皮膚下のサイズ評価を容易にするために、もう一方の手の親指と人差し指で精巣を軽く動かし確認します。(fig.1)

次にオーキドメーターを用いて精巣と比較しサイズを決定します。(fig.2)

精巣の大きさが2つのモデルの間にある場合、大きい方を選択してください。



発売元

株式会社キースマック

〒101-0064 東京都千代田区猿樂町 2-2-8

TEL (03) 3292-2506 FAX (03) 3292-2507

E-mail: info@kysmaq.co.jp

URL: http://www.kysmaq.co.jp